

ТЕКУЧИЙ композитний матеріал світлового твердіння Прайм-дент® Prime-Dent® Flowable Light Cured Composite

ТЕКУЧИЙ композитний матеріал світлового твердіння Прайм-дент® - це текучий композит з 67% наповненням, який чудово полірується та має робочі та естетичні характеристики, які найбільше цінують стоматологи.

ТЕКУЧИЙ композит світлового твердіння Прайм-дент® ідеально підходить для пломбування порожнин класу III, класу V, маленьких порожнин класу IV, превентивних реставрацій, реставрацій незначних дефектів та пломбування пошкоджень цервікальної області, спричинених ерозією емалі та осіданням ясен. Також можна застосовувати для ліквідації відколів перед взяттям відтисків для композитних вкладок та для вистілання порожнин і заповнення складних ділянок перед застосуванням композитів, які конденсуються.

Застосування:

З'єднання з дентином.

1. Ізольуйте, очистіть та препаруйте порожнину зуба. При глибоких реставраціях розмістіть відповідну основу/підкладочний матеріал, якщо це необхідно.
2. Протравіть дентин 37% протравлюючим агентом Прайм-дент® протягом 15 секунд. Ретельно ополосніть. Ця поверхня повинна залишатись чистою, уникайте потрапляння слини.
3. Найсильніше зчеплення досягається за допомогою нанесення Однокомпонентного дентинного/емалевого адгезиву світлового твердіння Прайм-дент® на протравлену поверхню дентину. Суворо дотримуйтеся інструкцій щодо застосування Однокомпонентного дентинного/емалевого адгезиву світлового твердіння Прайм-дент®.
4. Виберіть потрібний відтінок. Помістіть насадку з голковим аплікатором на шприц та розпочніть нанесення матеріалу. Наносьте матеріал вздовж осевого краю та краю ясна. Кінчиком голки заповнюйте композитом маленькі заглибини. Не наносьте шари товщі, ніж 2-3 мм. в глибину.
5. Світлове твердіння – 30 секунд. Шліфування стандартними борами та полірування.

З'єднання з емаллю.

Очистіть поверхню емалі пастою для очищення без олії. Добре промийте та просушіть. Ізольуйте область від потрапляння слини.

Нанесіть 37% протравлюючий гель Прайм-дент® на чисту суху емаль на 15-20 секунд. Добре ополосніть. Висушіть протравлену поверхню за допомогою чистого повітря без домішок. На протравлені поверхні не повинна попадати слина. Якщо протравлена емаль не набула білого крейдяного відтінку, повторіть процедуру протравлення.

1. Нанесіть Однокомпонентний дентинний/емалевий адгезив світлового твердіння Прайм-дент® на протравлену поверхню. Суворо дотримуйтеся інструкцій щодо застосування Однокомпонентного дентинного/емалевого адгезиву світлового твердіння Прайм-дент®.

Помістіть насадку з голковим аплікатором на шприц та розпочніть нанесення матеріалу.

Нанесіть на емаль ТЕКУЧИЙ композит світлового твердіння Прайм-дент®.

Світлове твердіння – 30 секунд. Шліфування стандартними борами та полірування.

Застереження

- Композит містить певні метакрилати та інші інгредієнти, які можуть викликати подразнення та чутливість у деяких людей. У випадку контакту зі шкірою негайно промийте водою з милом. Неправильне використання може спричинити алергічні реакції та подразнення шкіри і тканин. Якщо це сталося, припиніть застосування препарату. При роботі з цим препаратом необхідно використовувати захисні рукавички та окуляри. У випадку потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та терміново зверніться до лікаря.
- Уникайте контакту протравлюючого гелю з м'якими тканинами ротової порожнини, шкірою, очима. При випадковому контакті негайно промийте великою кількістю води.
- Не піддавайте матеріал дії високої температури та інтенсивного світла. Не зберігайте поблизу препаратів, які містять еugenol.
- Завжди закривайте ковпачки на шприцах і адгезивах відразу після використання, щоб уникнути випадкової полімеризації матеріалів від зовнішніх джерел світла.
Зберігайте при температурі 3-24°C